

車椅子 簡単チェックシート

()様

1 . 折りたたみ開閉がゆるんでいないか。	はい・いいえ
2 . タイヤの空気圧は適正か。	はい・いいえ
3 . 介助ブレーキはゆるんでいないか。(右)	はい・いいえ
4 . 介助ブレーキはゆるんでいないか。(左)	はい・いいえ
5 . 駐車ブレーキはゆるんでいないか。(右)	はい・いいえ
6 . 駐車ブレーキはゆるんでいないか。(左)	はい・いいえ
7 . 背シート(背もたれ)はたわんでいないか。	はい・いいえ
8 . 座シートはたわんでいないか。	はい・いいえ
9 . フットプレート(足のせ台)の取り付けは適正か。 (ねじはゆるんでいないか。)	はい・いいえ
10 . フットプレート(足のせ台)の向きは適正か。	はい・いいえ
11 . 前キャスター(前輪)のねじはゆるんでいないか。(右)	はい・いいえ
12 . 前キャスター(前輪)のねじはゆるんでいないか。(左)	はい・いいえ
13 . 前キャスター(前輪)の回転はゆるすぎないか。(右)	はい・いいえ
14 . 前キャスター(前輪)の回転はゆるすぎないか。(左)	はい・いいえ

年 月 日

担当者()

